


ad'just®


GARANTIE 1 AN  
garantie@adjust.fr

**KIT MONOBLOC** KIT DE MONTAGE POUR SIEGE MONOBLOC

Le kit est composé de ruban velcro noir de 5cm de large :  
50cm de crochet assemblé à 1m50 de velours .

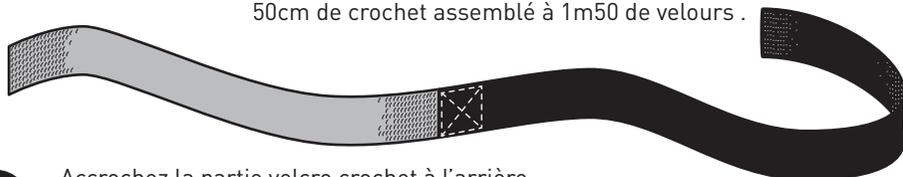


**1** Accrochez la partie velcro crochet à l'arrière et tout en haut de la pièce dorsale du coussin lombaire, en laissant dépasser une partie crochet équivalente de chaque côté.

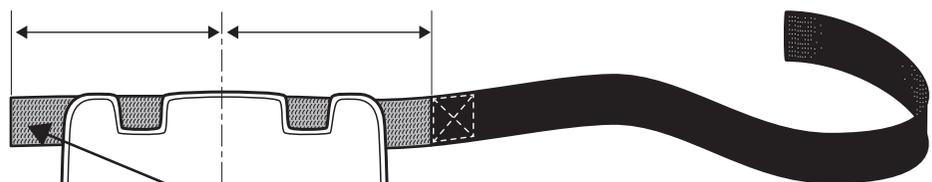


velcro crochet

**2** Présentez le coussin lombaire sur le dossier de votre siège et positionnez le en hauteur (veillez à laisser au moins 10 cm au bas de la pièce dorsale que vous glisserez plus tard entre l'assise et le dossier)

10 cm

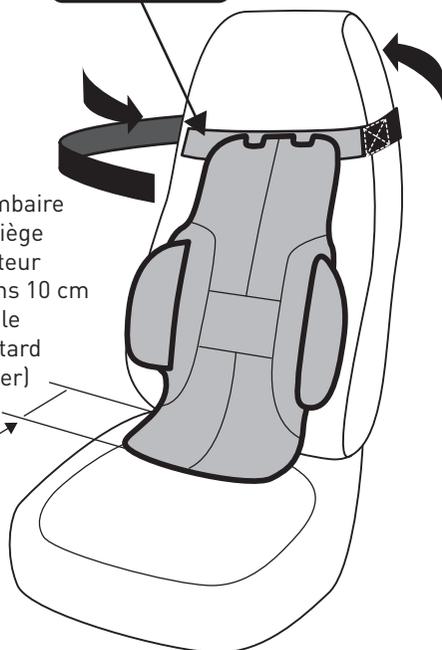

**3** Une fois la hauteur déterminée, faites le tour du dossier avec le ruban velours en le tendant bien et accrochez le sur la première zone de velcro crochet.

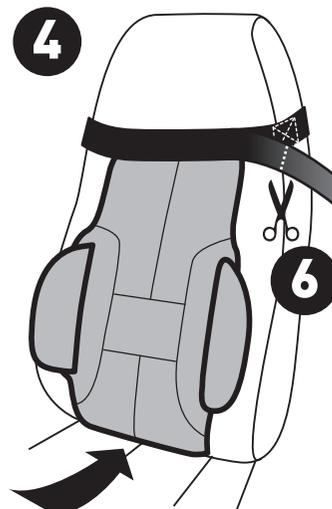

**4** Passez ensuite le ruban velours sur le devant de la pièce dorsale et accrochez le sur la deuxième zone de crochet.

Ceci permet à la fois de cacher les découpes prévues pour la fixation en cas d'appui-têtes à tiges et de fiabiliser la fixation.

**6** Lorsque vous serez certain de la bonne hauteur et de l'ajustement, coupez le surplus de ruban velours.

**5**

Pour finir, glissez le bas de la pièce dorsale entre l'assise et le dossier.

TOUS LES PRODUITS ad'just®




PRIX DE L'INNOVATION  
SANTÉ/SÉCURITÉ  
Préventica  
CONGRES // SALONS 2015

**COUSSIN LOMBAIRE**  
Calage lombaire et latéral

**KIT MONOBLOC**  
Kit de montage du coussin lombaire sur siège monobloc

**COUSSIN D'ASSISE**  
Ouvrir l'angle du bassin dos / jambes et atténuer les tensions

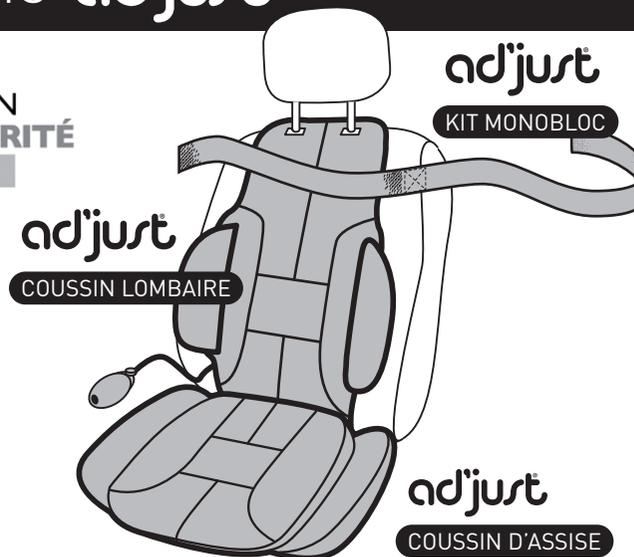

ad'just®  
COUSSIN LOMBAIRE

ad'just®  
KIT MONOBLOC

ad'just®  
COUSSIN D'ASSISE



contact@adjust.fr

www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

® Brevet et marque déposés