


# adjust

**KIT MONOBLOCCO**

**KIT DI MONTAGGIO  
PER SEDILE MONOBLOCCO**

Il kit è composto da nastro in velcro nero di 5 cm di larghezza: 50 cm di gancio assemblato a 1,50 m di velluto.

**1** Agganciate la parte velcro-gancio alla parte posteriore, nella parte alta dell'aera dorsale del cuscino lombare, lasciando passare una parte gancio equivalente da ciascun lato.

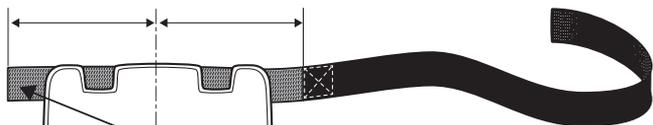


velcro-gancio

**2** Collocate il cuscino lombare sullo schienale del vostro sedile e posizionatelo in altezza (prestate attenzione a lasciare almeno 10 cm sulla parte bassa del pezzo dorsale che farete scivolare in un secondo momento tra la seduta e lo schienale)



**3** Una volta determinata l'altezza, fate il giro dello schienale con il nastro di velluto e tendetelo bene e agganciatelo sulla prima zona del velcro-gancio.

**GARANZIA  
1 ANNO**  
warranty@adjust.fr

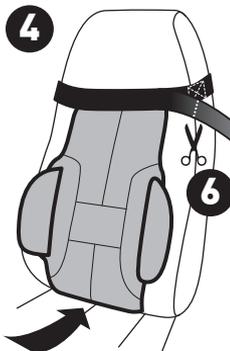

**4** Fate passare quindi il nastro di velluto sul davanti del pezzo dorsale e agganciatelo sulla seconda zona del gancio.

Questo consente di nascondere gli inserti previsti per il fissaggio in caso di poggiatesta con aste e di rendere più sicuro il fissaggio.

**6** Quando sarete certi che l'altezza e la regolazione siano corrette, tagliate il nastro di velluto in eccesso

**5**

Per finire, fate scivolare la parte bassa del pezzo dorsale tra la seduta e lo schienale.

TUTTI I PRODOTTI **adjust**



**PRIX DE  
L'INNOVATION  
SANTÉ/SÉCURITÉ**  
Prévention  
2015

**CUSCINO LOMBARE**  
Fissaggio lombare e laterale

**KIT MONOBLOCCO**  
Kit di montaggio  
del cuscino lombare  
su sedile monoblocco

**CUSCINO DA SEDUTA**  
Apre l'angolo  
del bacino schiena / gambe  
e attenua le tensioni

**adjust**  
CUSCINO LOMBARE



contact@adjust.fr

www.adjust.fr




**YouTube**

www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

© Brevetto e marchio depositati

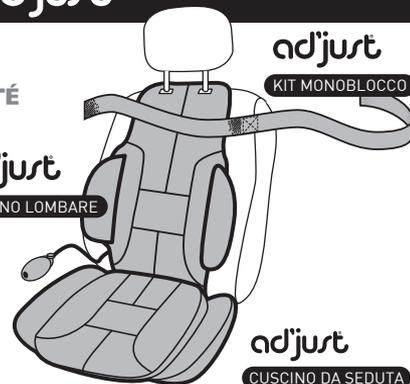

**adjust**  
KIT MONOBLOCCO

**adjust**  
CUSCINO DA SEDUTA