
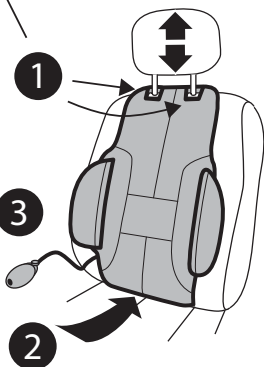


ad'just®

CUSCINO LOMBARE

Sollevare il poggiatesta senza rimuoverlo e fissare ad'just® per mezzo del nastro a strappo.


Posizionare la pompa a portata di mano. Assicurarsi che questa non interferisca con la guida o con elementi di sicurezza come le cinture, l'airbag ecc. Se necessario accorciare la lunghezza del tubo.

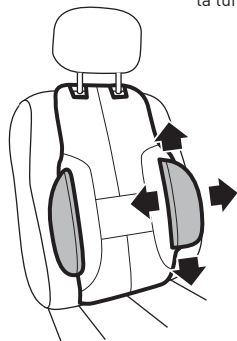

4

Posizionare i cuscini laterali in modo tale che non esercitino una pressione permanente sul corpo in quanto ciò potrebbe nuocere. E' soprattutto nelle curve che si avverte il loro sostegno.

**Suggerimenti:**  
Difficilmente si otterrà la posizione ideale al primo tentativo. Fate diverse prove per trovare la posizione giusta!  
Un buon consiglio: fate vostro "ad'just"! C'è chi sente la necessità di gonfiare e sgonfiare di frequente il dispositivo, altri che lo posizionano in verticale piuttosto che a livello lombare ecc.... Attento! Questo dispositivo è stato progettato per adulti e bambini al di sopra dei 10 anni. Non può in nessun caso sostituirsi ai seggioloni omologati per i bambini

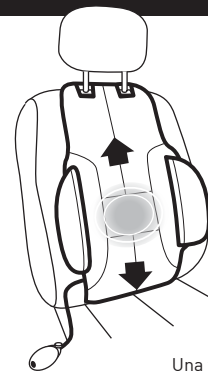

5

Per regolare l'altezza del supporto lombare, sedersi sul sedile poi far scorrere le mani tra lo schienale e ad'just®, staccare il cuscino gonfiabile e farlo scorrere lungo la zona lombare fino a trovare il punto più adatto.

Una volta tolta la mano il cuscino rimarrà in perfetta posizione.

GARANZIA  
1 ANNO  
warranty@adjust.fr

TUTTI I PRODOTTI ad'just




CUSCINO LOMBARE  
Fissaggio lombare e laterale

ad'just  
CUSCINO LOMBARE

KIT MONOBLOCCO  
Kit di montaggio del cuscino lombare su sedile monoblocco

CUSCINO DA SEDUTA  
Aprire l'angolo del bacino schiena / gambe e attenua le tensioni

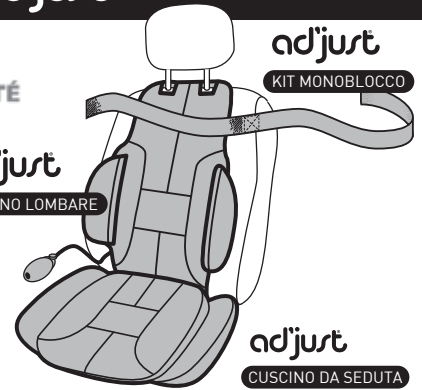

ad'just  
CUSCINO DA SEDUTA



@  
contact@adjust.fr  
www.adjust.fr

YouTube  
www.adjust.fr/youtube


adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France  
® Brevetto e marchio depositati

ad'just

CUSCINO DA SEDUTA


3 COMPONENTI:

- CUSCINO DA SEDUTA CON CUSCINI LATERALI
- CUSCINO DA SEDUTA SOLO
- CUSCINI LATERALI SOLI

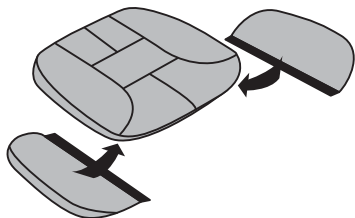


I due cuscini destro e sinistro si agganciano sotto il cuscino principale. Non esitate a provare differenti posizioni: l'obiettivo è di ottimizzare il vostro sostegno laterale nelle curve e il vostro comfort.

Delle fasce antiscivolo con silicone impediscono alla seduta di scivolare.

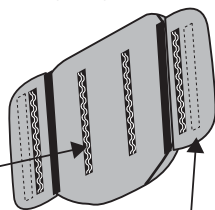


I cuscini sono sfoderabili e lavabili (30°C). Attenzione alle zone dei ganci che rovinano gli altri tessuti.

Un'area "coccige" può essere rimossa per alleviare la pressione su questa zona. E' sufficiente aprire la cerniera e rimuovere la parte presagomata.

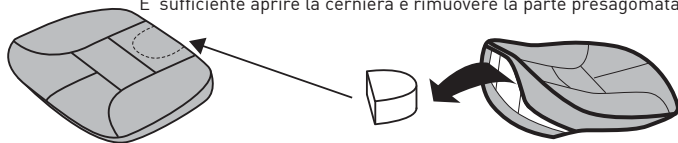


GARANZIA  
1 ANNO  
warranty@adjust.fr

La forma del cuscino della seduta consente di attenuare le tensioni nervose e muscolari nella parte inferiore della schiena.

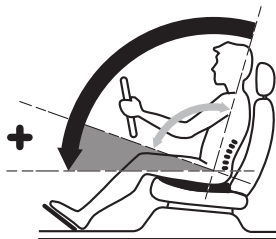

ASSOCIATE IL CUSCINO DA SEDUTA AL CUSCINO LOMBARE

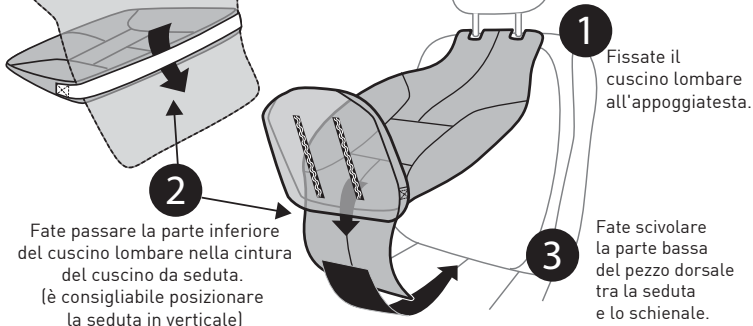

Fate passare la parte inferiore del cuscino lombare nella cintura del cuscino da seduta. (è consigliabile posizionare la seduta in verticale)

TUTTI I PRODOTTI ad'just




PRIX DE L'INNOVATION  
SANTÉ/SÉCURITÉ  
Prévention 2015

CUSCINO LOMBARE  
Fissaggio lombare e laterale

KIT MONOBLOCCO  
Kit di montaggio del cuscino lombare su sedile monoblocco

CUSCINO DA SEDUTA  
Apre l'angolo del bacino schiena / gambe e attenua le tensioni

ad'just  
CUSCINO LOMBARE

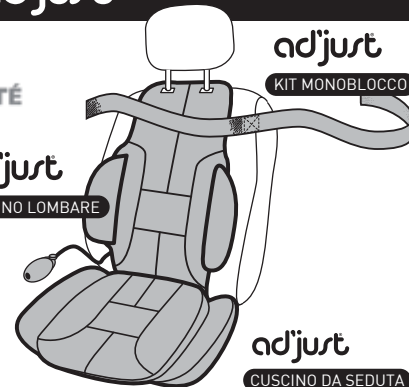

ad'just  
CUSCINO DA SEDUTA



contact@adjust.fr

www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

® Brevetto e marchio depositati