



FORMA DE USO



GARANTÍA 2 AÑOS

warranty@adjust.fr

ES

ad'just

COJÍN LUMBAR

Eleve el reposacabezas sin extraerlo y sujetelo ad'just® usando la tira de velcro.



1

3


2

Deslice la parte inferior de la pieza dorsal entre el asiento y el respaldo del vehículo

4

Coloque los cojines laterales de forma que no ejerzan una presión permanente sobre el cuerpo, lo cual podría provocar una lesión. En las curvas es donde percibirá la sujeción.

Coloque el inflador a mano. Compruebe que no obstruya la conducción ni ningún elemento de seguridad como el cinturón o el airbag. Acorte el tubo, en caso necesario.

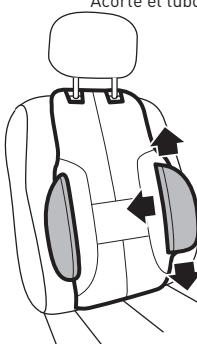


Consejos: Es difícil conseguir un buen ajuste a la primera. Haga varias pruebas hasta encontrar una buena posición.

¡Un consejo: adapta ad'just®! Algunos inflan y desinflan a menudo, otros colocan la membrana abajo del todo, otros incluso en posición vertical...

¡Atención! Este dispositivo está diseñado para adultos y niños mayores de 10 años.

En ningún caso puede sustituirse por una silla homologada para niños.

5

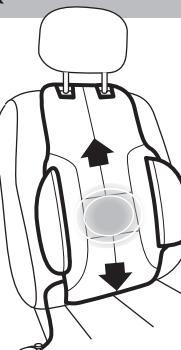

Para regular la altura del respaldo lumbar, colóquese en el asiento. Deslice una mano entre la espalda y el sistema ad'just para soltar el soporte. Deslice su mano y el soporte hacia su zona lumbar y una vez en su sitio, simplemente retire la mano.

La sujeción permanecerá fija en buena posición.

TODOS LOS PRODUCTOS **ad'just**



PRIX DE
L'INNOVATION
SANTÉ/SÉCURITÉ
Prévention
CONFÉDÉRATION 2015

ad'just

KIT MONOBLOC

ad'just
COJÍN LUMBAR

COJÍN LUMBAR


Sujeción lumbar y lateral

KIT MONOBLOC

Kit de instalación del cojín lumbar en asiento monobloc

COJÍN DE ASIENTO

Abra el ángulo del respaldo de espalda/piernas y reduzca las tensiones.

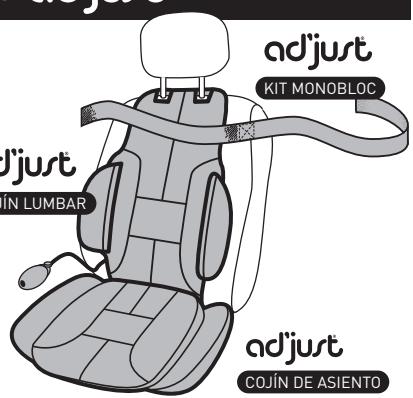

ad'just

COJÍN DE ASIENTO



contact@adjust.fr

www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

© Patente y marcas registradas



MODALITA' D'IMPIEGO



GARANZIA 2 ANNI

warranty@adjust.fr

IT

ad'just

CUSCINO LOMBARE

Sollevare il poggiatesta senza rimuoverlo e fissare ad'just® per mezzo del nastro a strappo.



1


3

2

Far scorrere la parte inferiore del pezzo dorsale tra il sedile e lo schienale.

4

Posizionare i cuscini laterali in modo tale che non esercitino una pressione permanente sul corpo in quanto ciò potrebbe nuocere. E' soprattutto nelle curve che si avverte il loro sostegno.

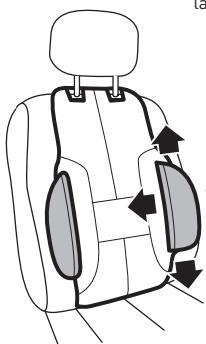

Suggerimenti:

Difícilmente si obtendrá la posición ideal al primer intento. Hacer varias pruebas para encontrar la posición correcta.

Un buen consejo: fate vostro "ad'just®!" C'è chi sente la necesidad de gonfiare y desgonfiar de vez en cuando el dispositivo, otros lo posicionan en vertical más que a nivel lumbar... ¡Atento! Este dispositivo es para adultos y niños de más de 10 años. No se puede sustituir por sillas homologadas para niños.



5

Per regolare l'altezza del supporto lombare, sedersi sul sedile poi far scorrere le mani tra lo schienale e ad'just®, staccare il cuscino gonfiabile e farlo scorrere lungo la zona lombare fino a trovare il punto più adatto.

Una volta tolta la mano il cuscino rimarrà in perfetta posizione.

TUTTI I PRODOTTI **ad'just**



PRIX DE
L'INNOVATION
SANTÉ/SÉCURITÉ
Prévention
CONFÉDÉRATION 2015

ad'just

KIT MONOBLOCCO

ad'just

CUSCINO LOMBARE

CUSCINO LOMBARE


Fissaggio lombare e laterale

KIT MONOBLOCCO

Kit di montaggio del cuscino lombare su sedile monobloc

CUSCINO DA SEDUTA

Apre l'angolo del bacino schiena / gambe e attenua le tensioni

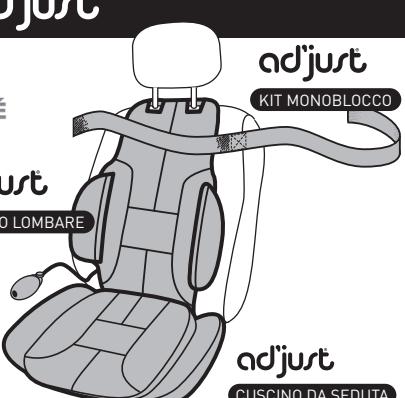

ad'just

CUSCINO DA SEDUTA



contact@adjust.fr

www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

© Brevetto e marchio depositati




ad'just

COJÍN DE ASIENTO

FORMA DE USO


La forma del cojín de asiento permite reducir las tensiones nerviosas y musculares de la zona inferior de la espalda.

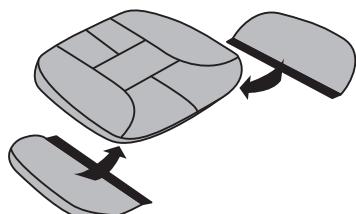


Los dos cojines derecho e izquierdo se enganchan debajo del cojín principal. Pruebe diferentes posiciones pues el objetivo es optimizar el apoyo lateral en las curvas y la comodidad.



Las bandas antideslizantes con silicona impiden su deslizamiento.

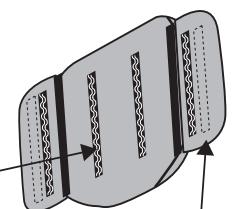

Los cojines son desenfundables y lavables (30°C). Cuidado con las zonas de enganche que dañan los demás tejidos.

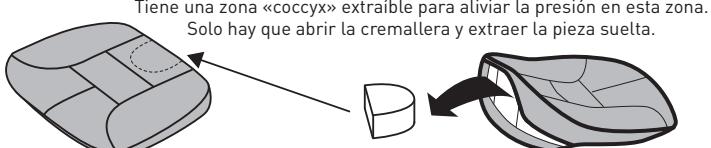

Tiene una zona «coccyx» extraíble para aliviar la presión en esta zona. Solo hay que abrir la cremallera y extraer la pieza suelta.



ad'just

CUSCINO DA SEDUTA

MODALITA' D'IMPIEGO

La forma del cuscino della seduta consente di attenuare le tensioni nervose e muscolari nella parte inferiore della schiena.




I due cuscini destro e sinistro si agganciano sotto il cuscino principale.

Non esitate a provare differenti posizioni:

L'obiettivo è di ottimizzare il vostro sostegno laterale nelle curve e il vostro comfort.


Delle fasce antiscivolo con silicone impediscono alla sedia di scivolare.

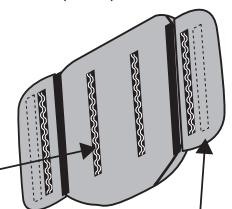

I cuscini sono sfoderabili e lavabili (30°C). Attenzione alle zone dei ganci che rovinano gli altri tessuti.



Un'area "coccige" può essere rimossa per alleviare la pressione su questa zona. E' sufficiente aprire la cerniera e rimuovere la parte presagomata.

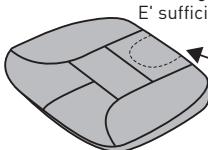


GARANTÍA 2 AÑOS

warranty@adjust.fr

ES

UNA EL COJÍN DE ASIENTO AL COJÍN LUMBAR

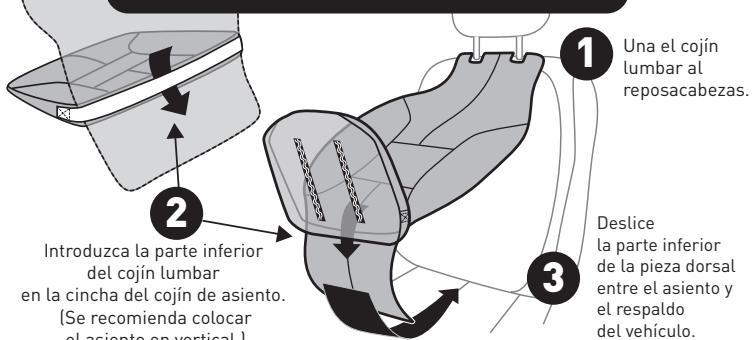

1 Una el cojín lumbar al reposacabezas.

2 Introduzca la parte inferior del cojín lumbar en la cincha del cojín de asiento. (Se recomienda colocar el asiento en vertical.)

3 Deslice la parte inferior de la pieza dorsal entre el asiento y el respaldo del vehículo.

TODOS LOS PRODUCTOS ad'just




PRIX DE
L'INNOVATION
SANTÉ/SÉCURITÉ
Prévention
Concours d'Innovation
2015

ad'just

KIT MONOBLOC

ad'just
COJÍN LUMBAR

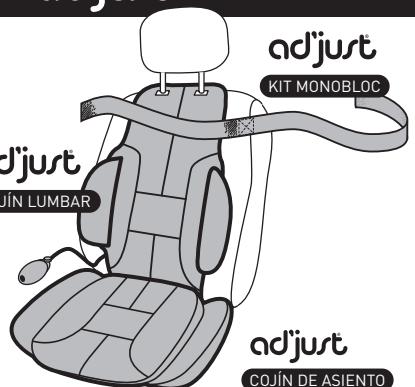

COJÍN LUMBAR

Sujeción lumbar y lateral

KIT MONOBLOC

Kit de instalación del cojín lumbar en asiento monobloc

COJÍN DE ASIENTO

Abra el ángulo del respaldo de espalda/piernas y reduzca las tensiones.



@
contact@adjust.fr
www.adjust.fr

YouTube
www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

© Patente y marcas registradas


IT



GARANZIA 2 ANNI

warranty@adjust.fr

ASSOCIARE IL CUSCINO DA SEDUTA AL CUSCINO LOMBARE

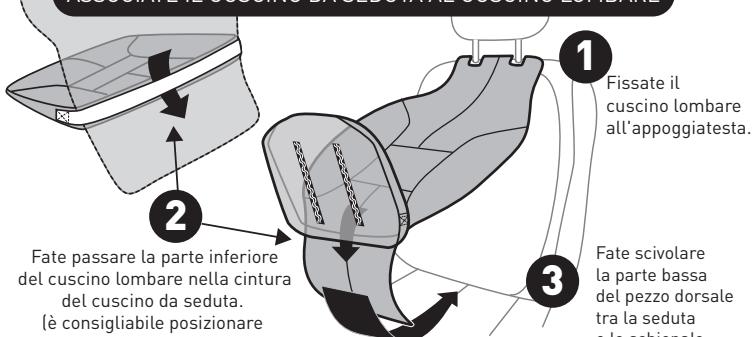

1 Fissate il cuscino lombare all'appoggiatesta.

2 Fate passare la parte inferiore del cuscino lombare nella cintura del cuscino da seduta. (è consigliabile posizionare la seduta in verticale)

3 Fate scivolare la parte bassa del pezzo dorsale tra la seduta e lo schienale.

TUTTI I PRODOTTI ad'just




PRIX DE
L'INNOVATION
SANTÉ/SÉCURITÉ
Prévention
Concours d'Innovation
2015

ad'just

KIT MONOBLOCCO

ad'just
CUSCINO LOMBARE

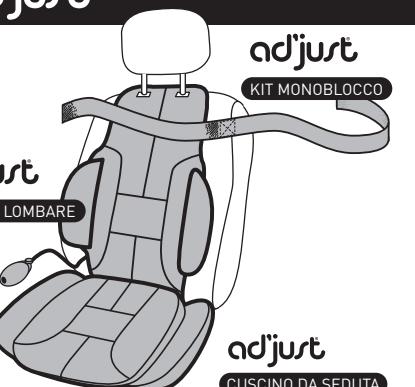

CUSCINO LOMBARE

Fissaggio lombare e laterale

KIT MONOBLOCCO

Kit di montaggio del cuscino lombare su sedile monobloc

CUSCINO DA SEDUTA

Apre l'angolo del bacino schiena / gambe e attenua le tensioni



@
contact@adjust.fr
www.adjust.fr

YouTube
www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

© Brevetto e marchio depositati